

Analyz Strep A



Analyz **Strep A** test Group A Streptococcal Antigen

For the rapid qualitative detection of
Group A Streptococcal antigen.

Fácil de usar

Larga caducidad

Almacenar a T^a ambiente

25 test/kit



PERFORMANCE

1

REAGENT
EXTRACTION TUBE

Ponga 4 gotas de Reactivo de Extracción 1 en el Tubo de Extracción

2

REAGENT
EXTRACTION TUBE

Añada 4 gotas de Reactivo de Extracción 2 en el Tubo de Extracción

TOMA DE MUESTRA

Use únicamente hisopos estériles de Dacron o Rayon con mango de plástico como los que vienen en el kit

3

1 minute
SWAB

Coloque el hisopo con la muestra en el tubo y con un movimiento circular gire el hisopo contra las paredes del tubo. Déjelo en el tubo durante al menos 1 minuto (Nunca más de 15 minutos)

4

Presione las paredes del tubo sobre el hisopo, para extraer la mayor cantidad de reactivo posible al sacar el hisopo del tubo

5

Sostenga la tira por aquí

Coloque el tubo en un soporte e introduzca la tira reactiva, leer a los 5 minutos. No leer después de pasados 10 minutos

INTERPRETATION OF TEST RESULTS

Dos líneas rojas indican resultado positivo

La intensidad de las líneas pueden variar

