

ImmunoCAP™ Rapid Wheeze/Rhinitis Child

Test de alergia frente a 10 alérgenos comunes con una simple muestra de sangre capilar.

 e1 Gato	 e5 Perro
 t3 Abedul	 t9 Olivo
 w6 Artemisia	 w21 Parietaria
 g6 Hierba Timotea	 d1 Acaro
 f1 Huevo	 f2 Leche

Resultados directos – claros y simples

Resultados directos

Directamente, muestra de sangre capilar y test de alergia en el mismo dispositivo. Resultados en 20 minutos para tomar decisiones futuras.

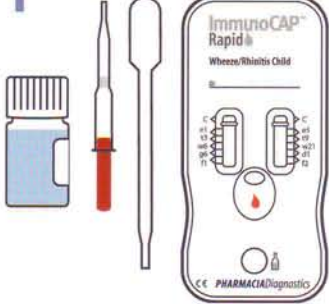
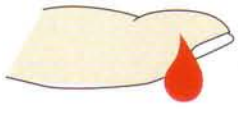
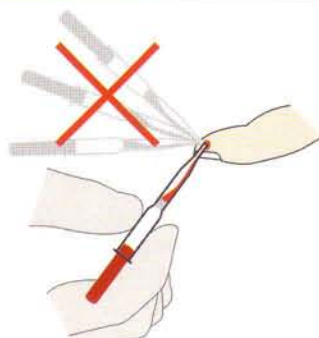
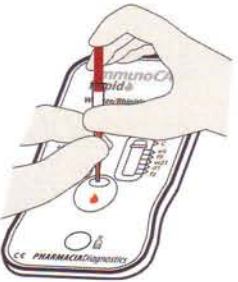



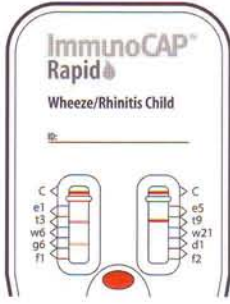
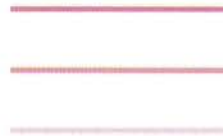
Claro

Fiable, visual y fácil de interpretar. Nos contesta a la pregunta ¿Es alergia?

Simple

Un test listo para usar con alérgenos seleccionados que correlacionan con un perfil de síntomas propios de la edad. Todo incluido, sólo añadir una muestra de sangre capilar.

Procedimiento del test

<p>1</p>  <p>Reactivos y material suministrados</p>	<p>2</p>  <p>El dedo del paciente debe estar templado. Usar una lanceta que proporcione un buen flujo de sangre. Pinchar la punta del dedo.</p>	<p>3</p>  <p>Recoger la sangre con el dispositivo de muestra de sangre según la imagen. No sobrepasar el límite indicado en el dispositivo.</p>
<p>4</p>  <p>Colocar el dispositivo del ensayo horizontalmente. Colocar la muestra de sangre en el orificio de muestra, presionando suavemente la pipeta cubriendo totalmente el pocillo de la muestra.</p>	<p>5</p>  <p>Esperar 5 minutos.</p>	<p>6</p>  <p>Después de 5 minutos: añadir 0,5 ml de solución de desarrollo en el orificio marcado con una botella. Usar la pipeta suministrada colocando la punta dentro del pocillo durante la dispensación.</p>
<p>7</p> <p>15</p>  <p>Esperar 15 minutos. Durante este tiempo aparecerán unas líneas rosadas en la ventana de control (C).</p>	<p>8</p>  <p>Lectura de resultados después de 15 minutos. Un resultado positivo se verá como una línea rosada junto al código del alérgeno específico.</p>	<p>9 Ejemplos de resultados positivos</p>  <p>Los colores que representan resultados positivos pueden diferir de intensidad, desde rosas suaves a rojos oscuros.</p>

Resultados directos – claros y simples

ImmunoCAPTM Rapid proporciona un perfil de resultados IgE específicas en niños y adultos con síntomas de eccema, sibilancias, rinitis y asma. Colocando una pequeña muestra de sangre capilar en el orificio de muestra, esperamos 20 minutos y leemos los resultados como bandas coloreadas. Entonces podemos decidir acciones futuras: evitación, eliminación, tratamiento, etc., antes de que el paciente abandone su consulta.

PHARMACIADiagnostics